

AiAlert™ Preguntas frecuentes

[¿Cómo funciona AiAlert™?](#)

[¿Cuándo debo aplicar los detectores?](#)

[¿Dónde debo colocar los detectores AiAlert™?](#)

[¿Cómo preparo la superficie?](#)

[¿Es la temperatura ambiente importante?](#)

[Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?](#)

- [¿Cómo funciona AiAlert™?](#)

Los detectores AiAlert™ contienen una cápsula sensible a la presión, la cual se activa cuando otras vacas ejercen presión sobre la vaca durante el comportamiento típico de celo. Un mecanismo de retraso de tiempo incorporado evita falsos positivos porque se necesita aproximadamente 3 segundos de actividad de monta para que el detector se active.

[Top](#)

- [¿Cuándo debo aplicar los detectores?](#)

Se debe aplicar los detectores AiAlert™ 25 días después del parto con el fin de detectar el primer ciclo estral.

[Top](#)

- [¿Dónde debo colocar los detectores AiAlert™?](#)

Los detectores AiAlert™ se deben aplicar bastante más adelante de la grupa, justo detrás de las caderas y de la cabeza de la cola puesto que éste es el lugar donde la vaca que monta ejercerá la presión máxima - Ver las imágenes siguientes:



[Top](#)

- [¿Cómo preparo la superficie?](#)

Quite el polvo y los pelos sueltos con el paño atrapapolvo suministrado. En el caso de superficies muy sucias o vacas que están pelechando, se recomienda usar un peine antes de usar el paño atrapapolvo. Asegúrese de no cepillar demasiado fuerte ya que esto puede activar los aceites naturales de la piel y reducir la adherencia. La superficie debe estar seca, por lo que no intente colocar el detector AiAlert™ sobre la piel mojada o en condiciones ambientales húmedas. Hay paños atrapapolvo de repuesto disponibles (AR/001).

[Top](#)

- ¿Es la temperatura ambiente importante?

A fin de aprovechar al máximo la adherencia de los parches, estos deben ser calentados por lo menos a la temperatura corporal antes de su colocación. Los parches no deben aplicarse durante condiciones ambientales húmedas, o cuando la vaca está mojada.

[Top](#)

- ¿Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o por teléfono:

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Top](#)