

AiReady™ Häufig gestellte Fragen

[Wie funktioniert AiReady™?](#)

[Wann soll ich die Erkennungsstreifen verwenden?](#)

[Wo soll ich meine AiReady™-Streifen anbringen?](#)

[Wie bereite ich die Oberfläche vor?](#)

[Spielt die Umgebungstemperatur eine Rolle?](#)

[Warum sind mehrere Farben erhältlich?](#)

[Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?](#)

- [Wie funktioniert AiReady™?](#)

Die silberne Beschichtung der AiReady™-Streifen wird durch das Aufspringen anderer Kühe wegen der Brunst abgerieben. Je deutlicher das Brunstverhalten wird, desto mehr Silberschicht wird abgerieben, so dass sich zwischen echter Hochbrunst und Aufspringen aus andern Gründen unterscheiden lässt.

[Nach oben](#)


- [Wann soll ich die Erkennungsstreifen verwenden?](#)

AiReady™-Streifen sollten 25 Tage nach dem Abkalben angebracht werden, um gleich die erste Brunst zu erkennen.

[Nach oben](#)

- [Wo soll ich meine AiReady™-Streifen anbringen?](#)

AiReady™-Streifen sind quer zur Rückenlinie ziemlich weit vorn auf der Kruppe, kurz hinter der Hüfte und am Schwanzansatz anzubringen, denn an dieser Stelle übt die aufspringende Kuh am meisten Druck aus; vgl. die folgende Abbildung.

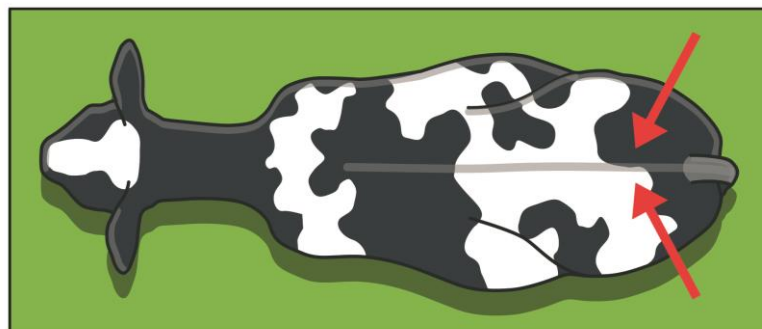

[Nach oben](#)

- Wie bereite ich die Oberfläche vor?

Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Reinigungstuch Staub und lose Haare. Bei Kühen im Fellwechsel und sehr schmutzigen Oberflächen empfehlen wir, mit einem Striegel vorzubürsten. Achten Sie aber darauf, nicht zu kräftig zu bürsten, da so der natürliche Talghaushalt des Fells gestört und damit die Haftung reduziert wird. Die Oberfläche muss trocken sein. Versuchen Sie also nicht, AiReady™-Streifen auf nasse Kühe oder bei feuchtem Wetter anzubringen.

Ersatzreinigungstücher sind erhältlich (AR/001). Drücken Sie den Streifen mit der ganzen Hand fest an und bewegen Sie die Hand dabei etwas vor und zurück, um eine gute Haftung zwischen dem Streifen und dem Fell des Tiers zu schaffen.

[Nach oben](#)

- Spielt die Umgebungstemperatur eine Rolle?

Um maximale Haftung zu erzielen, sind die Streifen vor dem Anbringen auf mindestens Körpertemperatur anzuwärmen. Die Streifen sollten keinesfalls angebracht werden, wenn das Wetter feucht oder die Kuh nass ist.

[Nach oben](#)

- Warum sind mehrere Farben erhältlich?

Wir bieten mehrere Farben entsprechend Bedarf unserer Kunden an, damit AiReady™ sich als Anzeige fortschreitenden Rinderns in einem umfassenden Fruchtbarkeitsmanagementprogramm verwenden lässt. Erhältlich sind die Farben Rot, Gelb, Magenta und Grün. Beispielsweise können verschiedene Farben zur Kenntlichmachung von noch nie besamten Tieren oder zur Unterscheidung von Problemkühen, solchen, die aus Gründen der Fruchtbarkeit tierärztlich behandelt wurden, oder solchen, die nach drei Wochen wieder „dran“ sind, verwendet werden.

[Nach oben](#)

- Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?

Weitere technische Informationen erhalten Sie gern bei Ambic per Mail oder Telefon:

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Nach oben](#)