

AiReady™ Questions fréquentes

[Comment est-ce qu'AiReady™ fonctionne ?](#)

[Quand vais-je utiliser les bandes de détection ?](#)

[Où vais-je mettre mes bandes AiReady™ ?](#)

[Comment vais-je préparer la surface ?](#)

[La température ambiante importe-t-elle ?](#)

[Pourquoi est-ce que plusieurs couleurs sont disponibles ?](#)

[Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?](#)

- [Comment est-ce qu'AiReady™ fonctionne ?](#)

La couche de couleur argent qui couvre les bandes AiAlert™ disparaît sous l'effet du chevauchement par les autres que la vache en chaleur accepte. Plus la vache reste immobile longtemps pour l'accepter, plus le frottement fait disparaître la couleur argent.

[Haut de page](#)


- [Quand vais-je utiliser les bandes de détection ?](#)

Les détecteurs AiReady™ devraient être mis 25 jours après le vêlage, afin de reconnaître le cycle suivant.

[Haut de page](#)

- [Où vais-je mettre mes bandes AiReady™ ?](#)

Les détecteurs AiReady™ seront mis en travers de la ligne dorsale, assez en avant sur la croupe, un peu derrière la hanche et près de l'attache de la queue, car c'est à cet endroit que la vache qui monte exerce le plus de pression ; cf. le dessin ci-dessous.

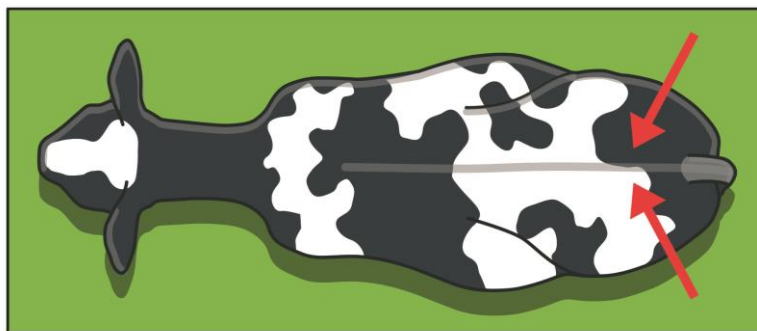

[Haut de page](#)

- [Comment vais-je préparer la surface ?](#)

À l'aide de la serviette de pansage fournie, enlever les poussières et poils morts. Pour les vaches faisant la mue et les souillures conséquentes, nous conseillons de passer l'étrille avant la serviette. Faire attention à ne pas étriller trop fort, car cela dérangerait les propriétés sébacées de la robe, d'où un effet adhérent réduit. La surface doit être sèche. Ne pas essayer de mettre des AiReady™ sur une robe humide ou par humidité ambiante élevée. Des serviettes de pansage détachées sont disponibles (AR/001). De toute la main, bien appuyer la bande contre le dos de l'animal en réalisant des mouvements en avant et arrière, afin d'obtenir une adhérence fiable avec le pelage.

[Haut de page](#)

- La température ambiante importe-t-elle ?

Afin de bénéficier d'une adhérence maximale, il faut porter les bandes au moins à la température corporelle avant leur application. Il est vivement déconseillé de mettre les bandes par temps humide ou lorsque la robe de la vache est humide.

[Haut de page](#)

- Pourquoi est-ce que plusieurs couleurs sont disponibles ?

Nous proposons plusieurs couleurs pour répondre au besoin de nos clients de se servir d'AiReady™ en tant qu'indicateur de chaleur montante dans le cadre d'un programme global de gestion de la fertilité. Au choix sont les couleurs rouge, jaune, magenta et verte. Les couleurs différentes peuvent être choisies, par exemple, pour mettre en relief les animaux encore jamais inséminés, ou reconnaître les vaches difficiles, celles qui ont été traitées pour des raisons de fertilité ou celles qui reviendront au bout de trois semaines.

[Haut de page](#)

- Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?

Pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Haut de page](#)